


Designparameter SD Manager für Druckdienstleistung



Modellgestaltung mit Modelltyp
„SHERAprint“

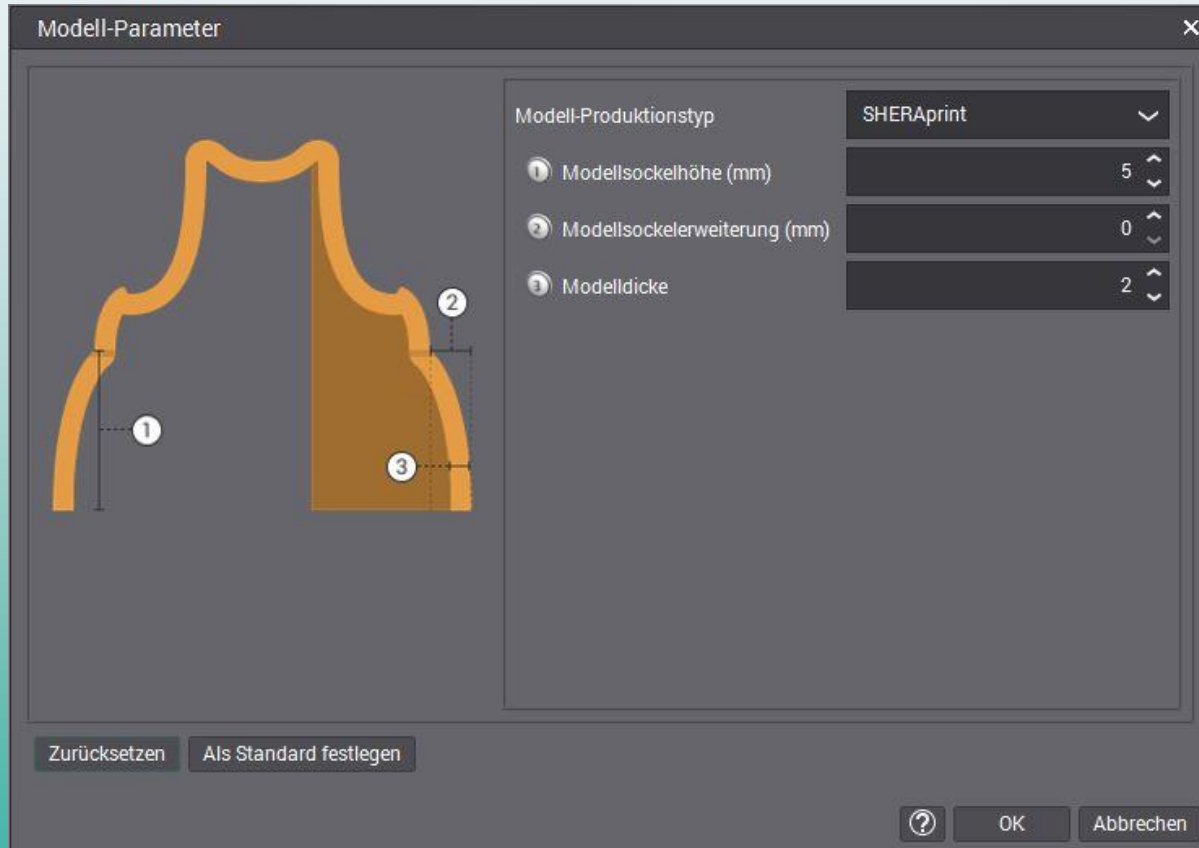


Modell-Produktionstyp	SHERAprint
Modellsockelhöhe:	5 mm (variabel)
Modellsockelerweiterung:	0 mm (variabel)
Modelldicke:	2 mm

Designparameter SD Manager für Druckdienstleistung



Stumpfgestaltung mit Stumpftyp SHERAprint cone - **einfarbig**

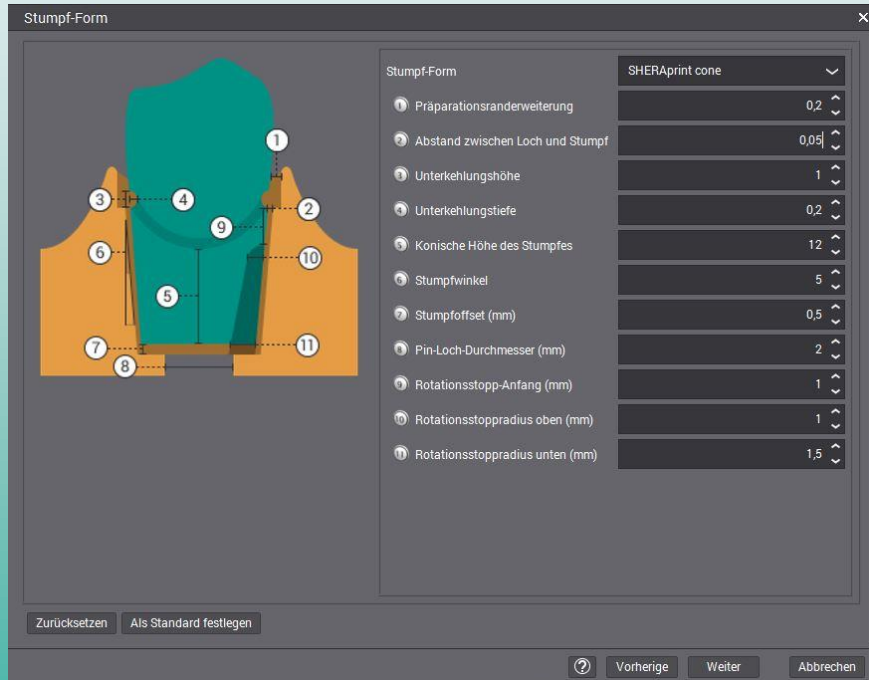


	SHERAprint model	SHERAprint model plus	SHERAprint model UV
	Silky Grey	Sand	Smoky White
Stumpf-Form	SHERAprint cone	SHERAprint cone	SHERAprint cone
Präparationsranderweiterung	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Abstand zw. Loch & Stumpf	0,02 mm	0,01 mm	0,04 mm
Unterkehlungshöhe	1 mm	1 mm	1 mm
Unterkehlungstiefe	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm
Konische Höhe d. Stumpfes	12 mm	12 mm	12 mm
Stumpfwinkel	5°	5°	5°
Stumpffoffset	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Pin-Loch-Durchmesser	2 mm	2 mm	2 mm
Rotationsstopp-Anfang	1 mm	1 mm	1 mm
Rotationsstoppradius oben	1 mm	1 mm	1 mm
Rotationsstoppradius unten	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm

Designparameter SD Manager für Druckdienstleistung



Stumpfgestaltung mit Stumpftyp SHERAprint cone - **mehrfarbig**

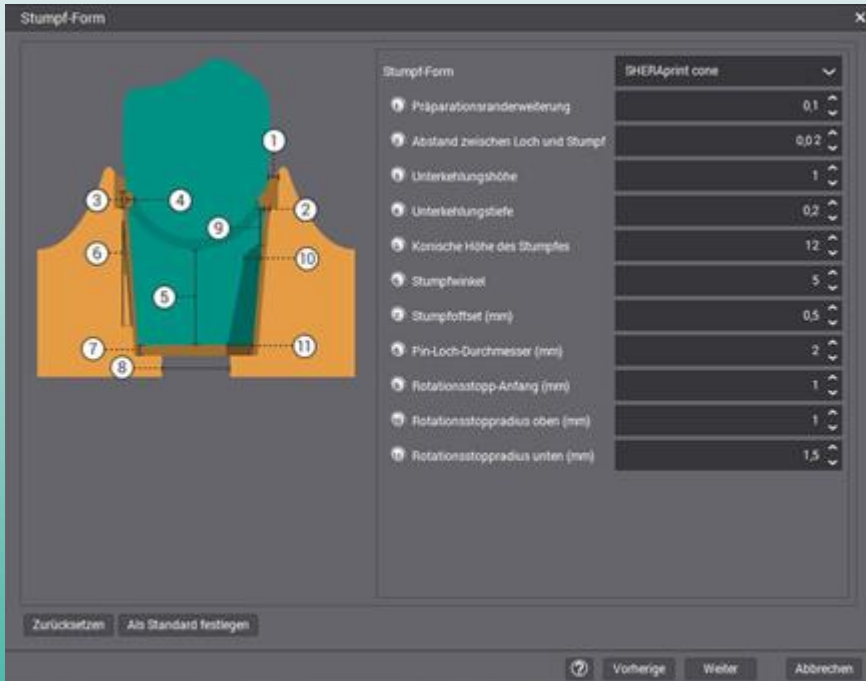


	SHERAprint model		SHERAprint model UV
Modellfarbe	Silky Grey	Silky Grey	Smoky White
Stumpffarbe	Sand	Smoky White	Sand
Stumpf-Form	SHERAprint cone	SHERAprint cone	SHERAprint cone
Präparationsranderweiterung	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Abstand zw. Loch & Stumpf	0,04 mm	0,04 mm	0,04 mm
Unterkehlungshöhe	1 mm	1 mm	1 mm
Unterkehlungstiefe	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm
Konische Höhe d. Stumpfes	12 mm	12 mm	12 mm
Stumpfwinkel	5°	5°	5°
Stumpffoffset	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Pin-Loch-Durchmesser	2 mm	2 mm	2 mm
Rotationsstopp Anfang	1 mm	1 mm	1 mm
Rotationsstoppradius oben	1 mm	1 mm	1 mm
Rotationsstoppradius unten	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm

Designparameter SD Manager für Druckdienstleistung



Parameter für SHERA4Implants
Modellimplantate

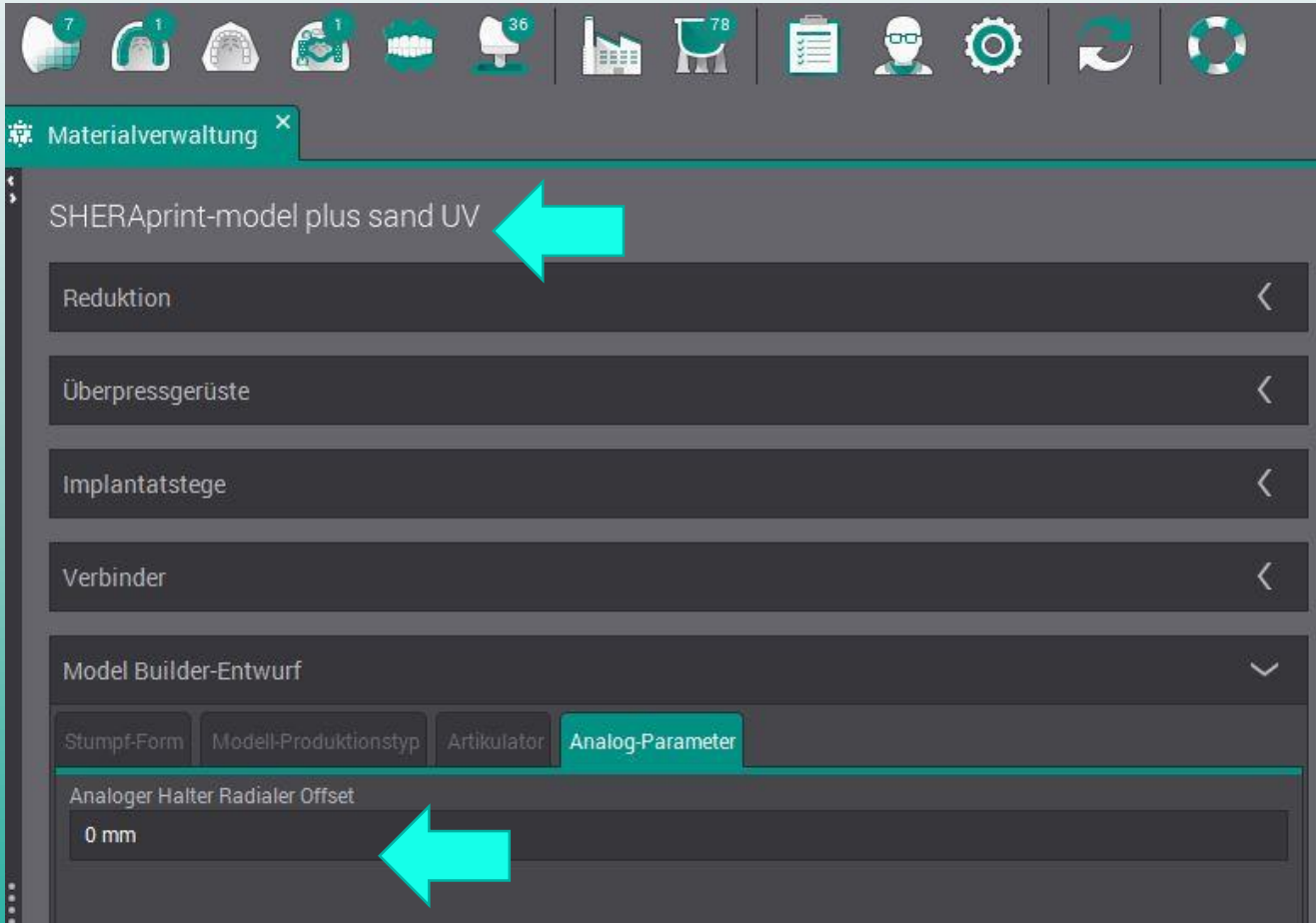

- Materialverwaltung anwählen
- Links das entsprechende Material z.B. SHERAprint-model plus sand UV anwählen
- Die Optionen für Model Builder-Entwurf öffnen
- Den Reiter Analog-Parameter anwählen

Analoger Halter Radialer Offset: 0 mm

gilt für: SHERAprint-model silky grey
SHERAprint-model plus sand
SHERAprint-model UV smoky white