

Designparameter Exocad für Druckdienstleistung




Modellgestaltung mit Modelltyp „Demo Occlusal Plane without plate“



Designparameter Exocad für Druckdienstleistung



Stumpfgestaltung

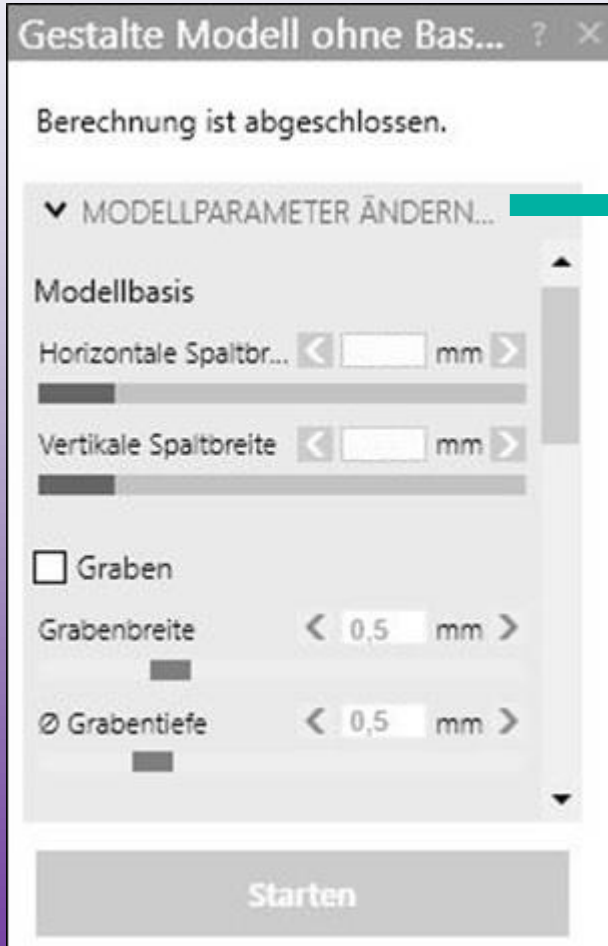

	SHERAprint model	SHERAprint model plus	SHERAprint model UV
	Silky Grey	Sand	Smoky White
Modellbasis			
Horizontale Spaltbreite	0,02 mm	0,03 mm	0,04 mm
Vertikale Spaltbreite	0,02 mm	0,03 mm	0,04 mm
Graben	deaktivieren	deaktivieren	deaktivieren

Designparameter Exocad für Druckdienstleistung



Stumpfgestaltung

Wizard Gestalte Modell ohne Basisplatte ?

Berechnung ist abgeschlossen.

▼ MODELLPARAMETER ÄNDERN...

Dies

Pinhöhe mm

Extrusion der Präpa... mm

Breite der Auflagefl... mm

Die-Pins auslassen

Unterkehlung

Entnahnehilfe

Starten

Dies


Pinhöhe: 2 mm
Extrusion der Präparation: 0 mm
Breite der Auflagefläche: 1 mm

Die-Pins auslassen: aktivieren
Unterkehlung: optional
Entnahnehilfe: deaktivieren

Designparameter Exocad für Druckdienstleistung



Stumpfgestaltung

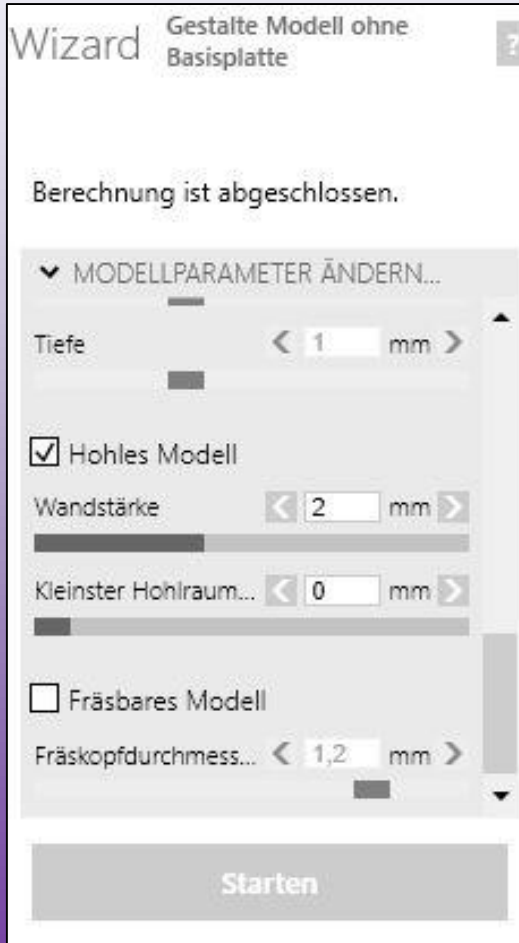

Tiefe: 1 mm

Hohles Modell: aktivieren

Wandstärke: 2 mm

Kleinster Hohlraum: 0 mm

Fräsbares Modell: deaktivieren