


# Designparameter SD Manager für Druckdienstleistung



Modellgestaltung mit Modelltyp „SHERAprint“

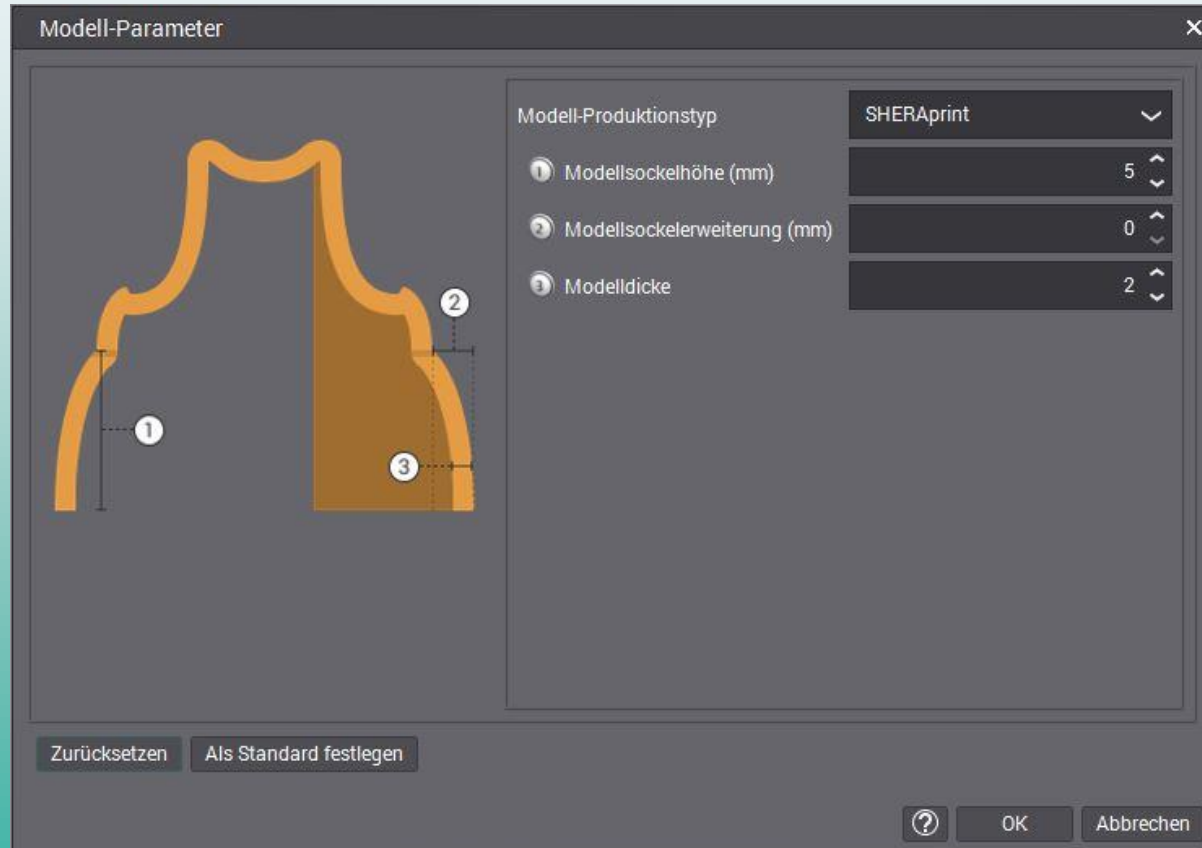

Modell-Produktionstyp

SHERAprint

Modellsockelhöhe:

5 mm (variabel)

Modellsockelerweiterung:


0 mm (variabel)

Modelldicke:

2 mm

# Designparameter SD Manager für Druckdienstleistung

Stumpfgestaltung mit Stumpftyp SHERAprint cone - **Stumpfformparameter**

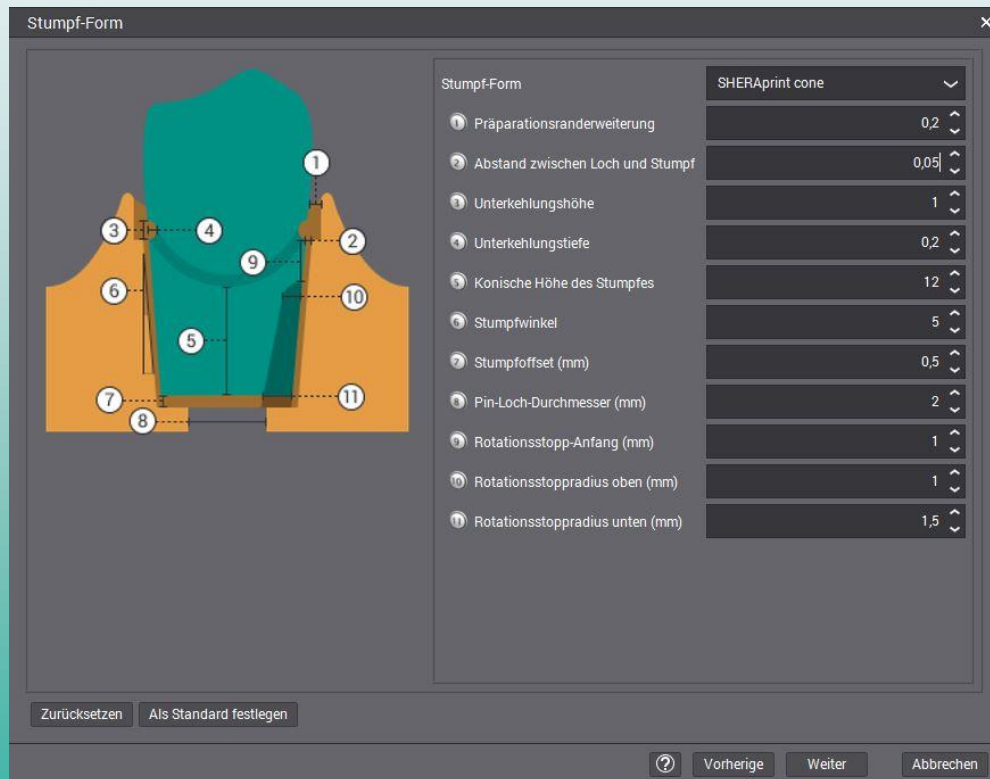


Gültig für alle Modelle

Stumpf-Form	SHERAprint cone
Präparationsränderweiterung	0,1 mm
Abstand zw. Loch & Stumpf	<b>Siehe Tabelle</b>
Unterkehlungshöhe	1 mm
Unterkehlungstiefe	0,2 mm
Konische Höhe d. Stumpfes	12 mm
Stumpfwinkel	5°
Stumpffoffset	0,5 mm
Pin-Loch-Durchmesser	2 mm
Rotationsstopp Anfang	1 mm
Rotationsstoppradius oben	1 mm
Rotationsstoppradius unten	1,5 mm

# Designparameter SD Manager für Druckdienstleistung



Stumpfgestaltung mit Stumpftyp SHERAprint cone - **Stumpfpassungsparameter**

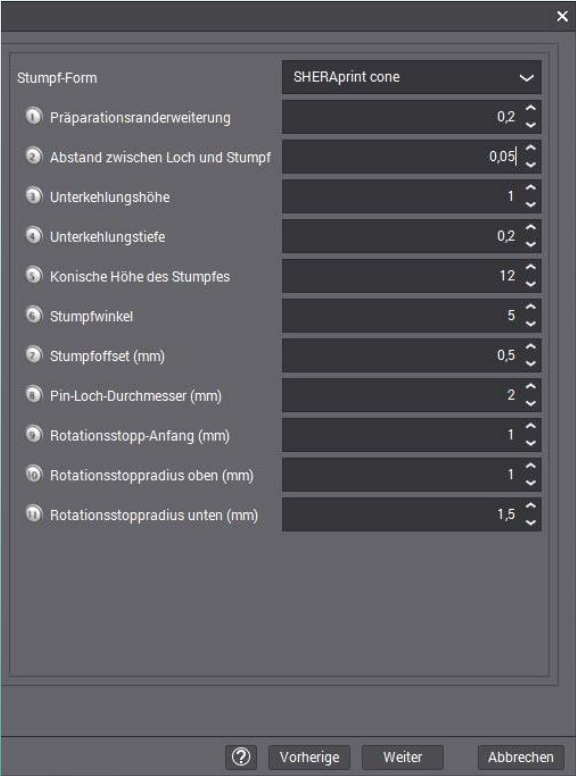

		Stumpffarbe		
		Stone	Desert	Smoky White
Modellfarbe	Stone	0,03	0,035	0,045
	Desert	0,03	0,02	0,04
	Smoky White	0,03	0,035	0,05
	Aesthetic Red		0,045	

# Designparameter SD Manager für Druckdienstleistung



Parameter für SHERA4Implants  
Modellimplantate



The screenshot shows the SD Manager software interface. At the top, there is a navigation bar with various icons. Below it, a menu titled 'Materialverwaltung' is open, showing a list of materials. The first item is 'SHERAprint-model plus sand UV', which is highlighted with a red arrow. Below this, there are several expandable sections: 'Reduktion', 'Überpressgerüste', 'Implantatstege', and 'Verbinder'. At the bottom, the 'Model Builder-Entwurf' section is expanded, showing a tabbed interface with 'Analog-Parameter' selected. Under this tab, the 'Analoger Halter Radialer Offset' is set to '0 mm', also highlighted with a red arrow.

- Materialverwaltung anwählen
- Links das entsprechende Material z.B. SHERAprint-model UV smoky white anwählen
- Die Optionen für Model Builder-Entwurf öffnen
- Den Reiter Analog-Parameter anwählen

Analoger Halter Radialer Offset: 0 mm

gilt für: SHERAprint-model Stone  
SHERAprint-model Desert  
SHERAprint-model UV Smoky White