

Designparameter Exocad für Druckdienstleistung

Modellgestaltung mit Modelltyp „Plateless model (cutout dies)“



Modellausrichtung ⓘ

Modelltyp:
Plateless model (cutout dies) ▾

Ausrichtung
Frei bewegen ▾
Frei drehen ▾

Automatisch Zurücksetzen

Höhe Oberkiefermodell 17,52 mm

Hindernisse autom. ausblenden

← ZURÜCK WEITER →

Designparameter Exocad für Druckdienstleistung

Stumpfgestaltung

Modell ohne Basisplatte

STÜMPFE MASKEN EINSTELLUNGEN

Pinhöhe < 1,5 mm >

Extrusion Präggenze < 0 mm >

Breite Auflagefläche < 1 mm >

Schaftverjüngung < 5° >

Verjüngungshöhenre... < 20 mm >

Stumpfpin auslassen

Hohlkehpräparation

Stumpfunterseite parallel zur Modellbasis

Zurücksetzen Aus Blickrichtung

RÜCKGÄNG. WIEDERH.

Starten

ZURÜCK WEITER

Modell ohne Basisplatte

STÜMPFE MASKEN EINSTELLUNGEN

Voreinstellungen

Option wählen

Option wählen

Voreinstellung automatisch speichern

Basis

Spaltbreite horiz. < 0,04 mm >

Spaltbreite vert. < 0,04 mm >

Sockelhöhe < 0 mm >

Präparation freilegen

Breite < 0,1 mm >

Ø Tiefe < 0,5 mm >

Starten

ZURÜCK WEITER

Modell ohne Basisplatte

STÜMPFE MASKEN EINSTELLUNGEN

Voreinstellungen

Option wählen

Option wählen

Voreinstellung automatisch speichern

Pins aussparen

Breite < 2 mm >

Tiefe < 1 mm >

Hohles Modell

Wandstärke < 2,5 mm >

Bodenschwelle < 0 mm >

Hohlraumdurchm. < 5 mm >

Starten

ZURÜCK WEITER

Modell ohne Basisplatte

STÜMPFE MASKEN EINSTELLUNGEN

Voreinstellungen

Option wählen

Option wählen

Voreinstellung automatisch speichern

Hohles Modell

Wandstärke < 2,5 mm >

Bodenschwelle < 0 mm >

Hohlraumdurchm. < 5 mm >

Fräsen vorausberechnen

Durchmesser < 0,2 mm >

Starten

ZURÜCK WEITER

Designparameter Exocad für Druckdienstleistung

Stumpfgestaltung



		Stumpffarbe		
		Stone	Desert	Smoky White
Modellfarbe	Stone	0,03	0,03	0,03
	Desert	0,02	0,03	0,03
	Smoky White	0,04	0,04	0,05
	Aesthetic Red		0,03	

Designparameter Exocad für Druckdienstleistung

Gingivagestaltung



Modell ohne Basisplatte

STÜMPFE MASKEN EINSTELLUNGEN

Gingivamaske

Mindestdicke < 1,5 mm >

Spaltbreite < 0,05 mm >

Höhenausgleich < 0 mm >

Retentionsnoppen

Durchmesser < 1,75 mm >

Trennung < 1 mm >

RÜCKGÄNG. WIEDERH.

Hinzufügen Entfernen

Starten

← ZURÜCK WEITER →