

Übertragung der Präparation von SEM in 3Shape laden


Voraussetzung:

- **SHERAeasy-model**
- 3Shape muss in Scanprozess STL-Dateien laden können (STL-Modul)

1. Modelle und Stümpfe in **SHERAeasy-model** designen



2. Modelldesign speichern, ggf. einen neues Order anlegen, um die STL-Dateien einfacher zu finden

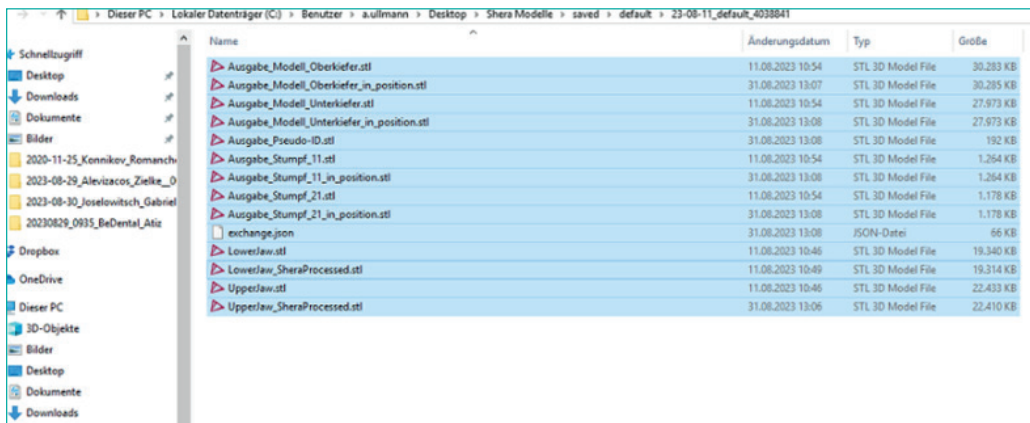

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
➤ Ausgabe_Modell_Oberkiefer.stl	11.08.2023 10:54	STL 3D Model File	30.283 KB
➤ Ausgabe_Modell_Oberkiefer_in_position.stl	31.08.2023 13:07	STL 3D Model File	30.285 KB
➤ Ausgabe_Modell_Unterkiefer.stl	11.08.2023 10:54	STL 3D Model File	27.973 KB
➤ Ausgabe_Modell_Unterkiefer_in_position.stl	31.08.2023 13:08	STL 3D Model File	27.973 KB
➤ Ausgabe_Pseudo-ID.stl	31.08.2023 13:08	STL 3D Model File	192 KB
➤ Ausgabe_Stumpf_11.stl	11.08.2023 10:54	STL 3D Model File	1.264 KB
➤ Ausgabe_Stumpf_11_in_position.stl	31.08.2023 13:08	STL 3D Model File	1.264 KB
➤ Ausgabe_Stumpf_21.stl	11.08.2023 10:54	STL 3D Model File	1.178 KB
➤ Ausgabe_Stumpf_21_in_position.stl	31.08.2023 13:08	STL 3D Model File	1.178 KB
exchange.json	31.08.2023 13:08	JSON-Datei	66 KB
➤ Lowerjaw.stl	11.08.2023 10:46	STL 3D Model File	19.340 KB
➤ Lowerjaw_SheraProcessed.stl	11.08.2023 10:49	STL 3D Model File	19.314 KB
➤ Upperjaw.stl	11.08.2023 10:46	STL 3D Model File	22.433 KB
➤ Upperjaw_SheraProcessed.stl	31.08.2023 13:06	STL 3D Model File	22.410 KB

3. 3Shape-Software öffnen und einen neuen Auftrag erstellen


WICHTIG: Objekttyp: Modell


Auftragsformular mit „OK“ verlassen




4. In der Auftragsübersicht Rechtsklick auf den zuvor angelegten Auftrag


und „Scannen“ auswählen

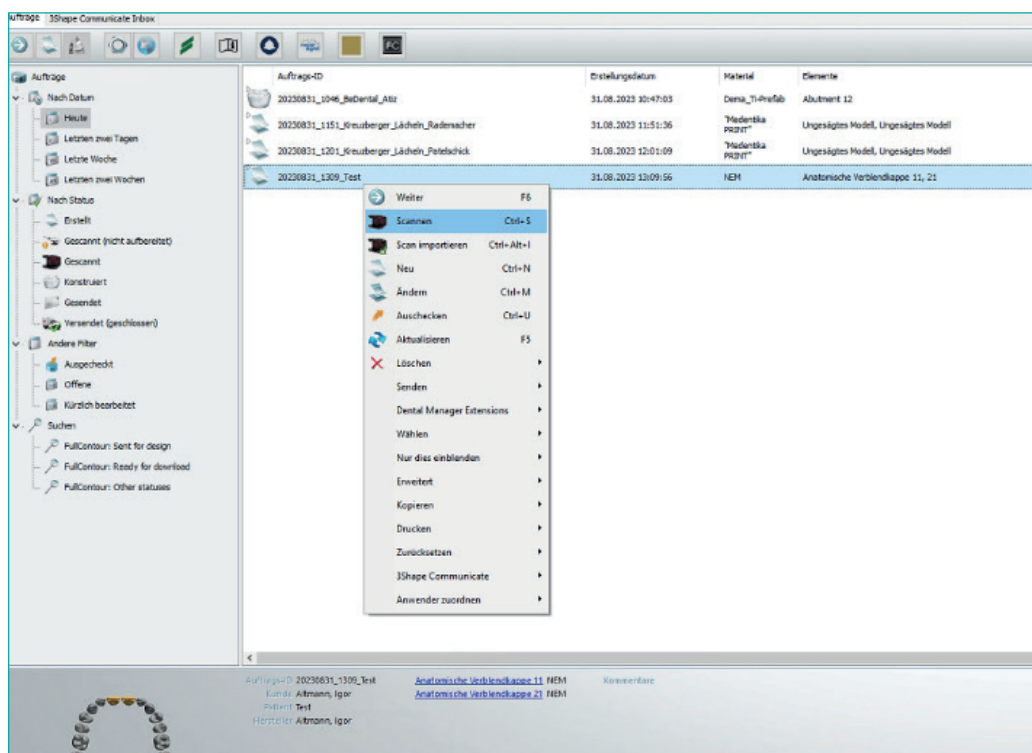

5. Im Scanprozess über die Funktion „Laden“  den Oberkiefer und Unterkiefer laden. Weiter die im Auftrag definierten Stümpfe am jeweiligen Modell bestimmen

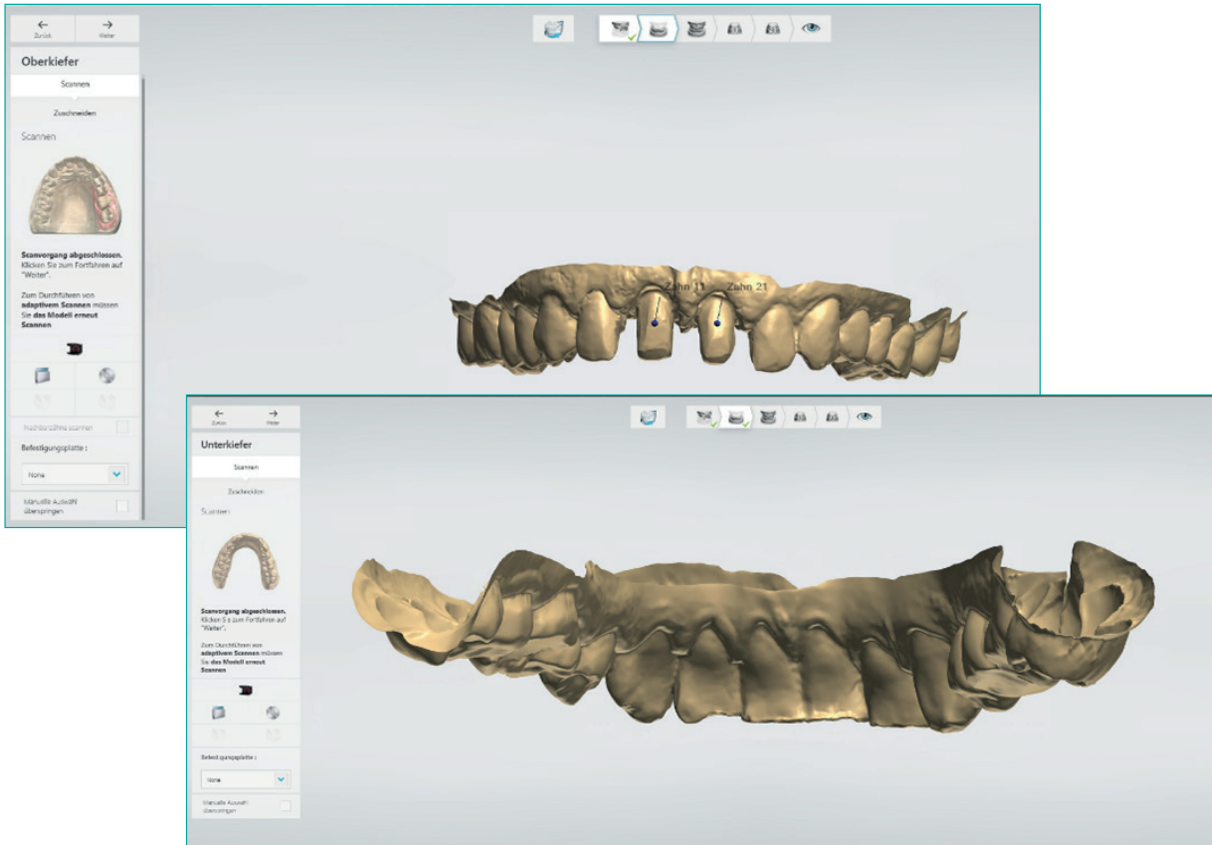


6. Oberkiefer und Unterkiefer verlieren so ihren Bezug, hier wird ein „Biss-Scan“ benötigt

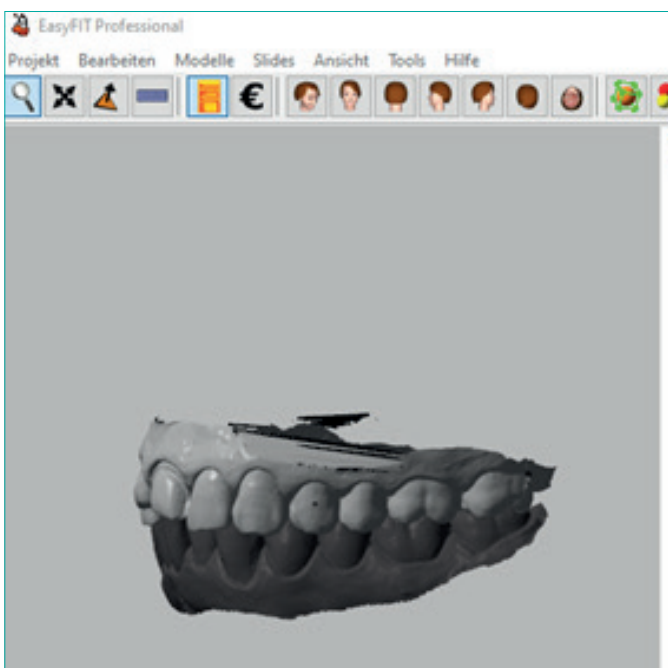


- A) Biss wurde vom Behandler mir eingescannt -> diesen verwenden
- B) Es ist kein Biss-Scan vorhanden -> Laden Sie die beiden Oberkiefer-, und Unterkiefer_SheraProcessed.stl aus SHERAeasy-model in einen x-beliebigen STL-Viewer (hier „easy-fit“) und speichern beide Dateien in eine neue Datei Biss.stl ab.


7. Laden Sie nun diese Biss-Datei ebenfalls in 3Shape

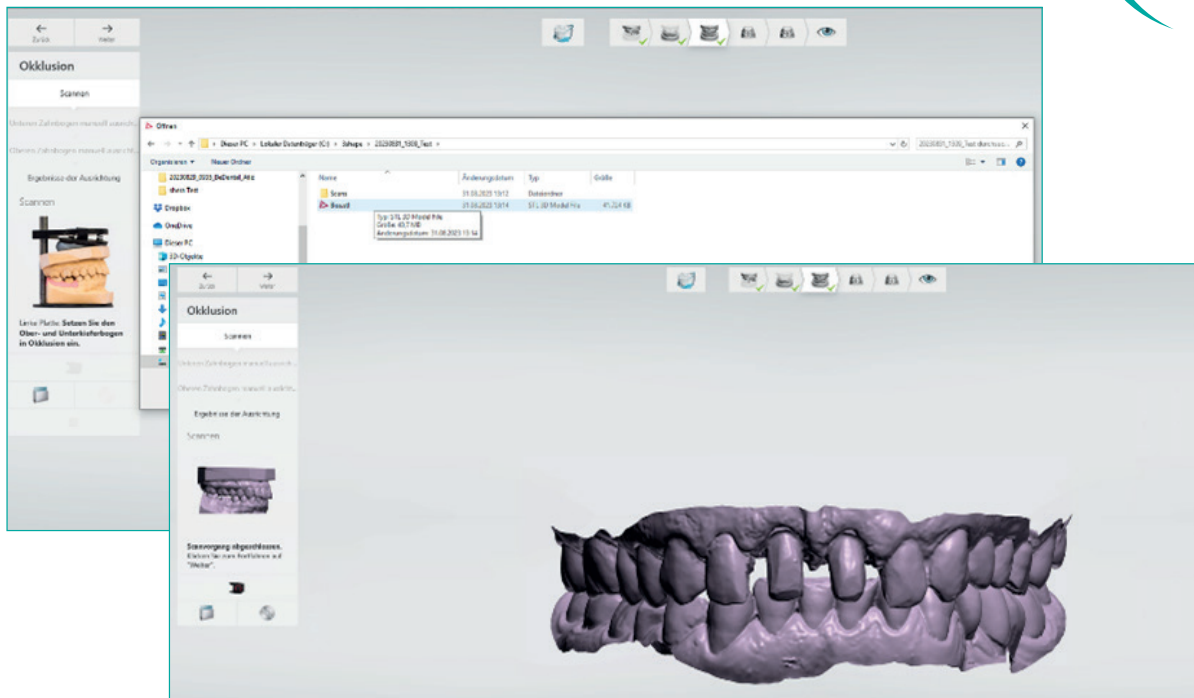


8. Laden Sie ebenfalls die einzelnen Stümpfe aus SHERAeasy-model wie oben beschrieben ein

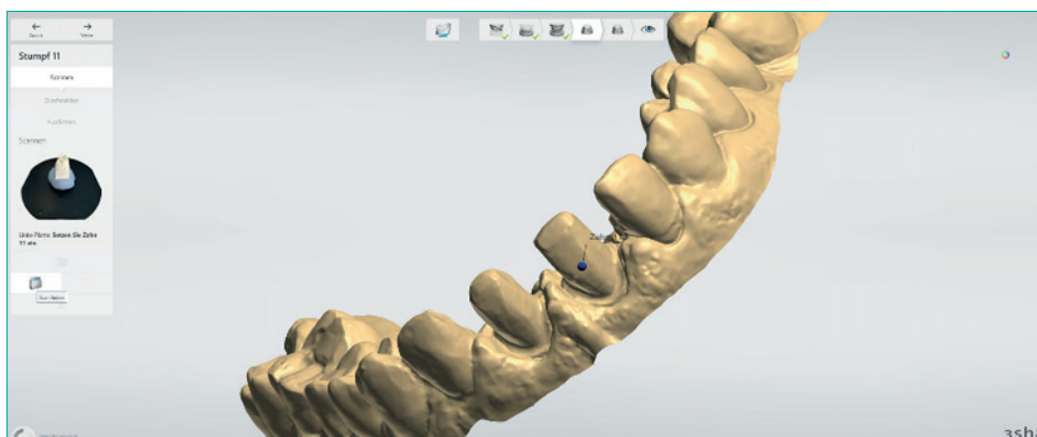


9. Die eingeladenen Stümpfe können nun bei Bedarf gekürzt werden

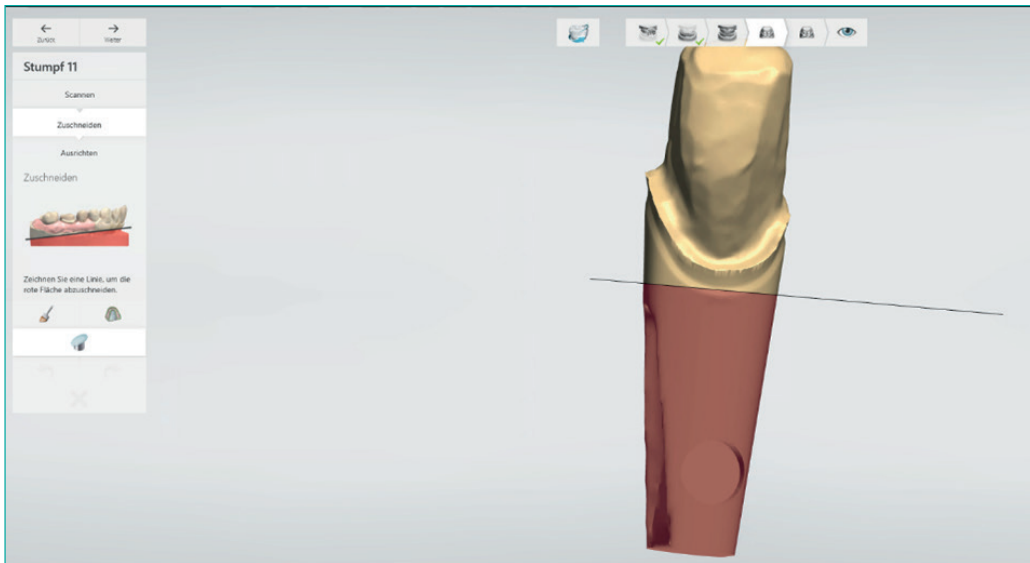


10. Nun werden Sie aufgefordert, die Oberkiefer- und Unterkieferdaten am Biss mittels 3-Punkt-Zuordnung auszurichten

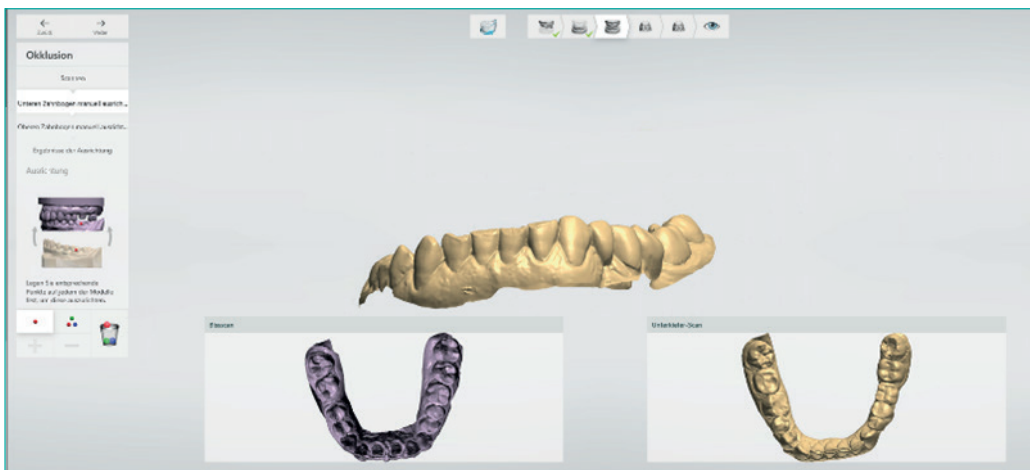

11. Selbiges für die Stümpfe

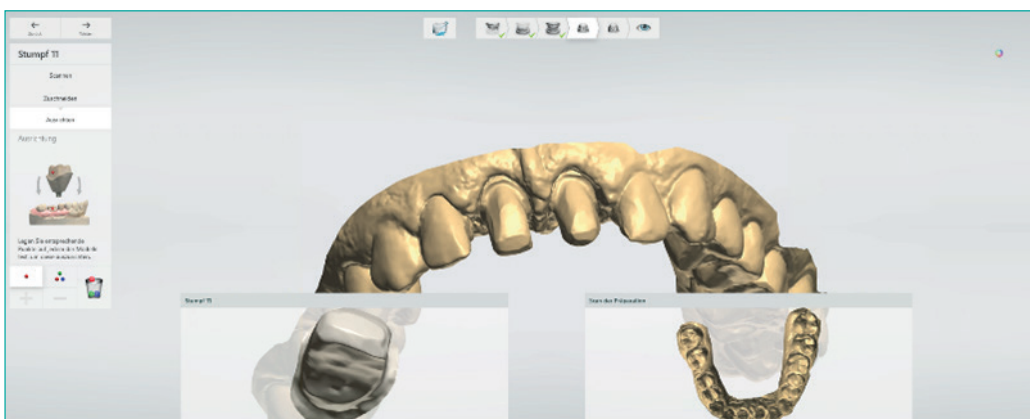

12. Anschließend können Sie wie gewohnt mit dem Design beginnen.

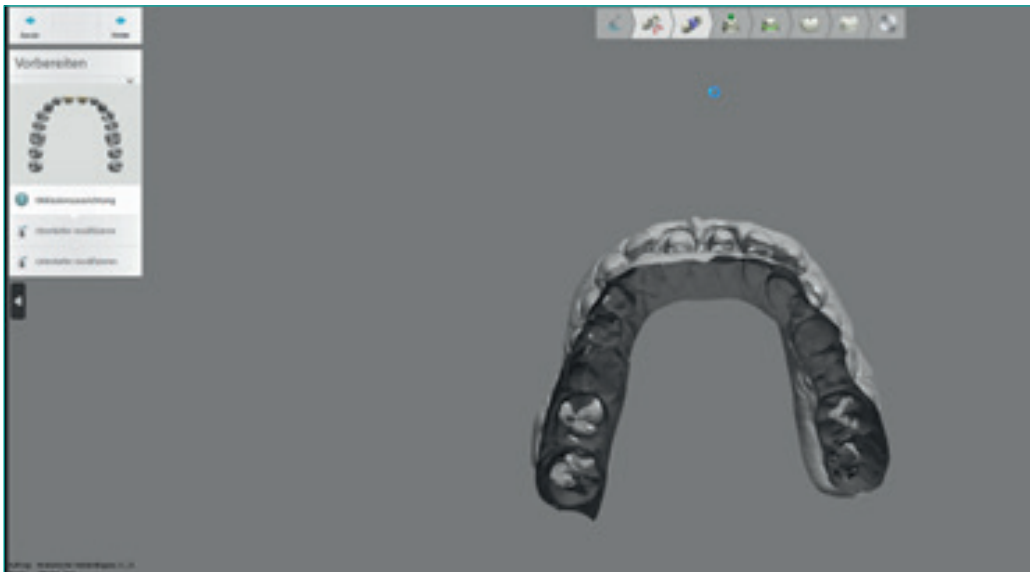

13. 3Shape erkennt nun automatisch am Stumpf die Prägengrenze.

